

TEVAFUK

AFK-103

Veteriner Dedektörü
Veterinary Metal Detector

Cihaz Kullanma Talimatları

Device instructions &
User Manual.



ENERJİ KAYNAĞI / POWER SUPPLY

Cihazın çalışabilmesi için standart ölçülere sahip 9 Volt pil kullanılır.
A standard size 9 Volt battery is used to operate the device.



Pil yuvasının açılması için, ok ile gösterilen kısımdan yukarı yönde kaldırılarak kullanıcı yönünde çekilir.

To open the battery compartment, please pull in the direction of the user by lifting upwards from the part indicated by the arrow.



9 Voltluk pil, pil yuvasına yukarıda gösterildiği şekilde montaj gerçekleştirilir.

The 9-volt battery is installed into the battery compartment as shown above.



Pil yuvası yukarıda gösterildiği şekilde cihaz üzerine montaj edilir.

The battery compartment is mounted to the device as shown above.

CİHAZ ÇALIŞMA VE HASSASİYET / DEVICE OPERATION AND PRECISION




» Çalışma ve hassasiyet ayarı cihaz üzerinde yukarıda ok ile gösterilen potansiyometre yardımıyla gerçekleştirilir.

» The operation and sensitivity setting is done with the help of on potentiometer, which is shown with arrows.

» Cihazın en verimli çalışma değeri, eşik değeridir.

» The most efficient operating value of the device is the threshold.

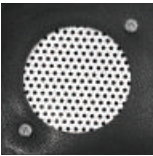

» Cihaz hasasiyet ayarı eşik değeri altında yapılırsa ses çıkarmayacak, eşik değeri üzerinde yapılırsa ses çıkartacaktır.

» If the device sensitivity setting is set below the threshold value, there won't be an audio signal; if it is set above the threshold value, it will make a sound.

» Cihaz ses çıkışı yanda gösterilen delikli panjur gerçekleşmektedir.

» The sound output is released through the shutters, the image on the left.

CİHAZ ÇALIŞMA / DEVICE OPERATION



- » Cihaz 6" arama başlığı ile metal tespiti yanda resimde gösterilen başlık alt kısmı ile yapmaktadır.
- » The device, AFK-103, detects metal with the bottom part of its 6 coils, as shown in the image.



- » Cihaz başlık dönme açısı yandaki resimde ok ile gösterilen bakalit ayar somunları ile gerçekleştirilmektedir.
- » The coil rotation angle is adjusted with bakelite nuts.

GARANTİ DURUMU / WARRANTY STATUS

- » Cihazın garanti süresi 24 (YirmiDört) aydır.
- » The warranty period of the device is 24 (Twenty-Four) months.
- » Cihazdan yapısı veya donanımında kaynaklanan bütün sorunlar garanti kapsamına girmektedir.
- » All problems arising from the structure or hardware of the device are covered by the warranty.

Garanti Dışı Kalan Durumlar / Situations Out of Warranty

- » Kullanıcı hatasından kaynaklı bütün arıza, bozulma, kırılma, açma veya açmaya zorlama vb. durumlarda cihaz garanti dışı kalmaktadır.
- » All malfunctions, deterioration, breakage, opening or forcing to open, etc. due to user error. In such cases, warranty will not cover.



- » Cihaz başlığı su geçirmez özelliğe sahiptir su geçirmesi durumunda garanti kapsamında işlem yapılır.
- » The device coil part is "waterproof." In case of any water leakage, the warranty will cover it.



- » Cihaz kontrol paneli su geçirmez özelliğe sahip değildir. Su geçirmesi durumunda cihaz garanti dışı kalmaktadır.
- » However, the control panel (image on the left) is not waterproof. In case of water leakage into this part, the warranty will not cover this.

TEVAFUK AFK-103

Veteriner Dedektörü

Veterinary Metal Detector



Noktasal tespit
Point detection



Sesli ikaz
Voice warning



13.5 kHz arama frekansı
13.5 kHz search frequency



Hafif ve güçlü
Lightweight and durable



Her türlü metal tespiti
Detection of all metal objects



teVafuk
dedektör

Tevafuk Elektronik Tekstil Tıbbi Gereçler Tic. ve San. Ltd. Şti.

www.tevafukdedektor.com